

GEBRAUCHSANWEISUNG

- (1) Verbinden Sie zunächst das Elektrodenkabel mit dem Reizstromgerät und schließen Sie an der anderen Seite entweder zwei Textilelektroden oder eine Textil- und eine Klebeelektrode an.
- (2) Entfernen Sie Schmutz, Fett, Cremes etc. sowie jeglichen metallischen Schmuck von der zu behandelnden Stelle und ziehen die Textilelektrode(n) an. Stellen Sie dabei sicher, dass die Textilelektrode(n) glatt anliegt/anliegen und keine Falten entstehen. Vermeiden Sie jedoch, die Textilelektrode(n) zu stark zu dehnen.
- (3) Sollten Sie nur eine Textilelektrode verwenden, benötigen Sie zum Stromfluss eine zusätzliche Klebeelektrode, die eine Mindestgröße von 50x50 mm haben sollte (kleinere Elektroden sind nicht zu empfehlen). Diese Elektrode sollte in der Nähe der Textilelektrode angelegt werden. Sie darf die Textilelektrode jedoch nicht berühren.
- (4) Stellen Sie sicher, dass beim Anlegen und Entfernen der Elektroden das Gerät ausgeschaltet ist.



ACHTUNG:
Vor dem Gebrauch lesen!



WARNHINWEISE:

- Die Textilelektrode ist nicht steril!
- Nicht an wunden Stellen einsetzen! Wenden Sie die Elektrode nur auf gesunder Haut an. Sollte es zu Hautirritationen kommen, brechen Sie die Therapie ab und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Arzt oder Therapeuten auf.
- Setzen Sie die Textilelektrode nur in Verbindung mit batteriebetriebenen Elektrostimulationsgeräten ein. Nicht an Hochfrequenzgeräte anschließen!
- Stimulieren Sie nicht während des Autofahrens oder der Bedienung von Maschinen.
- Beachten Sie die im Rahmen des Stimulationsgerätes festgelegten Kontraindikationen (Lesen Sie Bedienungsanleitung des Gerätes oder fragen Sie Ihren Arzt/Therapeuten).
- Die Textilelektrode darf nicht verwendet werden, wenn sie zerrissen oder beschädigt ist.
- Das Reizstromgerät, das in Verbindung mit der Textilelektrode eingesetzt wird, muss den entsprechenden Standards entsprechen.
- Entfernen Sie die Elektrodenkabel nicht durch Ziehen an den Kabeln selbst.

REINIGUNG DER ELEKTRODE:

- Entfernen Sie vor der Reinigung den mit einem Druckknopf an der Textilelektrode befestigten Kabeladapter.
- Reinigen Sie die Textilelektrode mit warmem Wasser (bis 30°C) per Handwäsche.
- Verwenden Sie keine alkoholischen Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Weichspüler.
- Die Textilelektrode ist nicht zum Bügeln geeignet!
- Die Textilelektrode kann nicht sterilisiert werden.

HINWEISE: Lagern Sie die Textilelektrode in trockener Umgebung. Ihre Lebensdauer hängt maßgeblich von Gebrauch, Pflege und Lagerung ab.



tic Medizintechnik GmbH & Co. KG

Endelner Feld 9 • D - 46286 Dorsten • Fon: +49 (0) 23 69 . 20 85 - 0
eMail: info@ticmed.de • Web: www.ticmed.de • Shop: www.tic-direkt.de

